

EXAMVISION™



Συγχαρητήρια για το
νέο σας σύστημα LED



Περιεχόμενο

| | |
|--|----|
| Εισαγωγή | 3 |
| Εκκίνηση – Χρήση του φωτισμού σας για πρώτη φορά | |
| Κατεύθυνση καλωδίου φωτισμού | 4 |
| Αντικαταστάσιμο καλώδιο | 4 |
| Βοήθεια και καθοδήγηση | 4 |
| Εγγύηση | 5 |
| Μονάδα ελέγχου και φωτισμός | |
| PowerBand | 6 |
| Focus™ Xtend | 10 |
| Essential One | 12 |
| Essential Alpha | 16 |
| Σύμβολα και οδηγίες για κατάλληλη χρήση | 18 |



Εισαγωγή

Έχετε επιλέξει ένα υψηλής ποιότητας σύστημα φωτισμού, προσαρμοσμένο έτσι ώστε να παρέχει την ακριβή ποσότητα φωτισμού, ακριβώς εκεί που το χρειάζεστε. Ο χρόνος λειτουργίας των συστημάτων φωτισμού της ExamVision κυμαίνεται από 2 έως 24 ώρες, ανάλογα με το επιλεγμένο σύστημα φωτισμού και την ένταση φωτός.

Τα συστήματα φωτισμού μας είναι σχεδιασμένα για ανέπαφη ή για λειτουργία με ελεύθερα χέρια για αποστειρωμένα περιβάλλοντα.

Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα από το νέο σας σύστημα φωτισμού, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες και τα βίντεο καθοδήγησης – ή ζητήστε βοήθεια από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της ExamVision.


Εκκίνηση – Χρήση του φωτισμού σας για πρώτη φορά

Κατεύθυνση καλωδίου φωτισμού

Με εξαίρεση το Essential One LED, που είναι ασύρματο, το καλώδιο φωτισμού μπορεί να στερεωθεί στο δεξιό ή τον αριστερό βραχίονα της λούπας. Για βέλτιστη ισορροπία, συνιστούμε στη συνέχεια το καλώδιο να διέρχεται γύρω από το πίσω μέρος του λαϊμού σας και να συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου στην αντίθετη πλευρά.

Συστήματα φωτισμού Focus™ και EssentialNano:

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του καλωδίου, χαλαρώστε τη μικρή βίδα και περιστρέψτε απαλά το δακτύλιο στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος αγγίζει το καλώδιο και στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα.

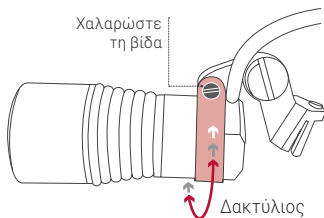

Σύστημα φωτισμού Essential Alpha:

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του καλωδίου, κατευθύνετε απλά το καλώδιο προς τα δεξιά ή αριστερά του βραχίονα της λούπας.

Αντικαταστάσιμο καλώδιο Συστήματα φωτισμού Focus™ και EssentialNano:

Εάν το καλώδιό σας υποστεί ζημία μπορείτε να το αντικαταστήσετε εύκολα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της ExamVision, οποίος μπορεί να κανονίσει την αντικατάσταση.

Βοήθεια και καθοδήγηση

Επισκεφτείτε το Κέντρο Εξυπηρέτησης στο κανάλι της ExamVision στο YouTube για χρήσιμα βίντεο. Για προβολή, απλά σαρώστε τον κωδικό QR. Για περισσότερες τεχνικές προδιαγραφές δείτε examvision.com



Εγγύηση

Μονάδα ελέγχου PowerBand/Μονάδα ελέγχου Focus™ Xtend/Σύστημα φωτισμού Focus™ True & Bright Essential Nano και αξεσουάρ
Obuhvaćeno trogodišnjim jamstvom proizvođača. Καλύπτονται από 3ετή εγγύηση του κατασκευαστή.

Αντικαταστάσιμο καλώδιο και οπίσθια πλάκα συστήματος Focus™ True & Bright και Essential Nano

Καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή 1 έτους.

Essential Alpha kontrolna jedinica, baterija, svjetlo, kabel i dodaci Μονάδα ελέγχου, μπαταρία, λαμπτήρας, καλώδιο και εξαρτήματα του συστήματος Essential Alpha

Καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή 1 έτους.

Συστήματα φωτισμού Essential One

Καλύπτεται από 2ετή εγγύηση του κατασκευαστή.

Μπαταρία, φορτιστής και αξεσουάρ του συστήματος Essential One

Καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή 1 έτους.

Η φυσιολογική φθορά, η ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης ή συντήρησης δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επιστρέψτε τη συσκευή στον αντιπρόσωπό σας της ExamVision για επισκευή.

Δείτε επίσης στη διεύθυνση: examvision.com/warranty



PowerBand

Θύρα φόρτισης



Ανέπαφος Αισθητήρας
Κίνησης

Θύρα LED



Κουμπι
Ενεργοποίησης

Λειτουργία του PowerBand

Δεξιά πλευρά Ανέπαφος Αισθητήρας Κίνησης



Αλλαγή έντασης φωτός

Περνώντας το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα αλλάζει η ένταση του φωτός από χαμηλή σε υψηλή.



Απενεργοποίηση

Κρατήστε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα για 3 δευτερόλεπτα.

Αριστερή πλευρά Κουμπί Ενεργοποίησης

Ενεργοποίηση

Πατήστε μία φορά το Κουμπί Ενεργοποίησης.



Εναλλαγή μεταξύ των πλευρών λειτουργίας

Za prebacivanje radnog Γρα να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας μεταξύ του Κουμπιού Ενεργοποίησης και του Ανέπαφου

αισθητήρα, πατήστε το Κουμπί Ενεργοποίησης 3 φορές διαδοχικά. Όταν αναβοσβήνει η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία, είναι ενεργό το Κουμπί Ενεργοποίησης. Όταν αναβοσβήνει η ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία, είναι ενεργός ο Ανέπαφος Αισθητήρας.



Αλλαγή έντασης φωτός

Με ένα πάτημα του κουμπιού αλλάζει η ένταση του φωτός από χαμηλή σε υψηλή.



Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα.



Λειτουργία του PowerBand

Μνήμη

Όταν απενεργοποιείτε τη μονάδα PowerBand, αυτή θα διατηρεί τις ρυθμίσεις (ένταση φωτός και τρόπος λειτουργίας).

Χρόνος λειτουργίας

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας σας ποικίλει ανάλογα με την ένταση του φωτός. Η χαμηλότερη ρύθμιση μπορεί να σας αποδώσει έως και 24 ώρες συνεχούς χρήσης και η υψηλότερη ρύθμιση περίπου 12 ώρες.



Κατάσταση στάθμης μπαταρίας



100% - 20% φορτισμένη

Συνεχώς αναμμένη πράσινη λυχνία



20% - 10% φορτισμένη

Συνεχώς αναμμένη κίτρινη λυχνία



10% - 0% φορτισμένη

Συνεχώς αναμμένη κόκκινη λυχνία

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας



10% - 0%
φορτισμένη

Αναβοσβήνει κόκκινη
λυχνία



10% - 20%
φορτισμένη

Αναβοσβήνει κίτρινη
λυχνία



20% - 99%
φορτισμένη

Αναβοσβήνει πράσινη
λυχνία



100%
φορτισμένη

Συνεχώς αναμμένη πράσινη
λυχνία

Σημειώστε: Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της μονάδας λαμπτήρα, ενώ φορτίζει η μονάδα ελέγχου PowerBand.

Ο μέσος χρόνος φόρτισης μιας κενής μπαταρίας είναι 2,5 ώρες.



Focus™ Xtend



Λειτουργία του Focus™ Xtend

Ενεργοποίηση



Πατήστε μία φορά το Κουμπί Ενεργοποίησης. (Η μονάδα ελέγχου θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια μονάδα λαμπτήρα).

Αλλαγή έντασης φωτός



Υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού της μονάδας ελέγχου Focus™ Xtend με ελεύθερα χέρια, πιέζοντας τον μπροστινό πίνακα, πχ. με τον αγκώνα.

Πιέζοντας σύντομα τον πίνακα γίνεται εναλλαγή μεταξύ 3 εντάσεων φωτός.


Απενεργοποίηση



Πιέστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα.

Χρόνος λειτουργίας

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας σας ποικίλει ανάλογα με την ένταση του φωτός, από 6 έως και 24 ώρες συνεχούς χρήσης.

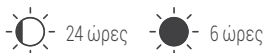

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

Όταν η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση, θα αναβοσβήνει ο δείκτης φόρτισης.



Bat. Χρειάζεται φόρτιση



Bat. Εκτελείται φόρτιση



Bat. Φόρτιση ολοκληρώθηκε

Ο μέσος χρόνος φόρτισης μιας κενής μπαταρίας είναι 2,5 ώρες.

Essential One



Λειτουργία του συστήματος Essential One

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση



Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών στη βάση σύνδεσης του φωτισμού. Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε το φωτισμό με ένα απλό πάτημα στο επάνω μέρος της μπαταρίας.

Αλλαγή έντασης
φωτός




Ο φωτισμός σας έχει δύο διαφορετικές εντάσεις, ελέγχεται με ένα γρήγορο πάτημα στη δεξιά πλευρά.


Σημείωση

Όταν συνδέετε ή αποσυνδέεται το μετωπιαίο φωτισμό στο τμήμα του πλαισίου του συστήματος Essential One, σύρετε το λαμπτήρα κατά μήκος της τροχιάς του συνδέσμου. Βεβαιωθείτε ότι αυτό γίνεται σε κατακόρυφη ευθεία, όπως υποδεικνύεται παρακάτω με τα κόκκινα βέλη. Όταν πιέζετε το λαμπτήρα στη θέση του, εφαρμόστε ελαφρά πίεση.

Όταν τον αφαιρείτε, εφαρμόστε πίεση με τον αντίχειρά σας ακριβώς από κάτω. Μην τον περιστρέψετε οριζόντια προς τα έξω.

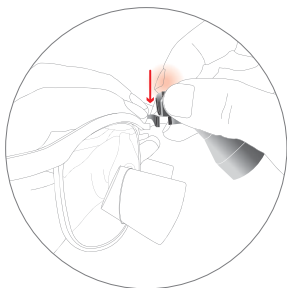

Σύνδεση λαμπτήρα

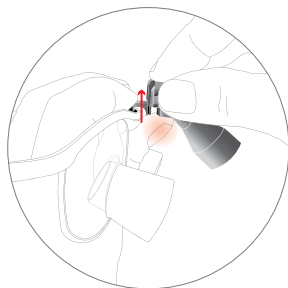

Αποσύνδεση λαμπτήρα

Λειτουργία του συστήματος Essential One

Χρόνος λειτουργίας

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας σας ποικίλει ανάλογα με την ένταση του φωτός, από 2 έως και 3,5 ώρες συνεχούς χρήσης.



Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

Όταν ακούγεται ήχος από τη μπαταρία, χρειάζεται φόρτιση.



Συνδέστε τη βάση φόρτισης με το φορτιστή και τοποθετήστε την μπαταρία πάνω στη βάση φόρτισης.

Ο μέσος χρόνος φόρτισης μιας κενής μπαταρίας είναι 1,5 ώρα.

 κτελείται φόρτιση  Φόρτιση ολοκληρώθηκε



Essential Alpha

Κύριο χειριστήριο Ελέγχου
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
& ένταση φωτός

Θύρα
φόρτισης

Δείκτης Στάθμης
Μπαταρίας

Θύρα LED

Δείκτης Φόρτισης
Μπαταρίας



Λειτουργία του συστήματος Essential Alpha

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση



Περιστρέψτε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε το φωτισμό.

Αλλαγή έντασης
φωτός



Περιστρέψτε το κουμπί για να αλλάξετε την ένταση του φωτός.

Χρόνος λειτουργίας

Η χαμηλότερη ρύθμιση μπορεί να σας αποδώσει έως και 12 ώρες συνεχούς χρήσης, ενώ η υψηλότερη ρύθμιση περίπου 4 ώρες.



12 ώρες



4 ώρες

Κατάσταση στάθμης μπαταρίας

Ο δείκτης ισχύος θα εμφανίζει πόση φόρτιση απομένει στην μπαταρία.

■ ■ ■ ■ Φορτισμένος κατά 25%

■ ■ ■ ■ Φορτισμένος κατά 50%

■ ■ ■ ■ Φορτισμένος κατά 75%

■ ■ ■ ■ Φορτισμένος κατά 100%

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

■ Εκτελείται φόρτιση

■ Φόρτιση ολοκληρώθηκε

Σύμβολα και οδηγίες για κατάλληλη χρήση



Κατασκευαστής

ExamVision ApS, Industrivej 11, 8305 Samsø, Δανία.

www.examvision.com



eFU Indicator

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες Χρήσης

Για τις ψηφιακές εκδόσεις σε διάφορες γλώσσες ακολουθείτε αυτό το σύνδεσμο:

examvision.com/support



Προσοχή. Σωστή χρήση και συντήρηση

Μην τροποποιείτε ή μεταβάλετε το προϊόν σας της ExamVision. Αποφύγετε να αγγίξετε το περιβλήμα του λαμπτήρα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης σε υψηλή ένταση φωτός, καθώς ενδέχεται να έχει ζεσταθεί. Μην εκθέτετε το προϊόν σε εξαιρετικά θερμές, κρύες ή υγρές συνθήκες.

Μην βραχυκυκλώνετε το προϊόν σας της ExamVision.

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη διάρκεια ζωής, να χειρίζεστε πάντα τις συσκευές με προσοχή.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν ExamVision. Εάν οι συσκευές υποστούν ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της ExamVision για περαιτέρω βοήθεια.

Φροντίδα και καθαρισμός

Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη στα βύσματα και τις συνδέσεις.

Φροντίδα της Μπαταρίας

Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη από τον κατασκευαστή. Η καλύτερη πρακτική είναι να διατηρείτε την μπαταρία σας φορτισμένη σε ποσοστό άνω του 30%. Οι μερικές φορτίσεις δεν βλάπτουν την μπαταρία σας.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Όταν η μπαταρία σας φτάσει στο τέλος της φυσικής της ζωής, έπειτα από περίπου 500 φορτίσεις, θα διαπιστώσετε ότι πρέπει να φορτίζεται πιο συχνά.

Ανοχή στο νερό

Το σύστημα φωτισμού της ExamVision και η μονάδα ελέγχου δεν έχουν σχεδιαστεί για να βυθίζονται σε νερό. Καθαρίστε αμέσως τυχόν πιτσιλιές για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη μονάδα σας.

Απολύμανση

Χρησιμοποιείτε μόνο μη-αλκοολούχα απολυμαντικά προϊόντα, όπως τα Απολυμαντικά Μαντηλάκια της ExamVision (διατίθενται από τον αντιπρόσωπο της ExamVision). Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση το οινόπνευμα, καθαριστικά υπερήχων, αυτόκαυστο ή άλλη χημική απολύμανση. Ένα υγρό μαντηλάκι αγγίζει ταυτόχρονα και τα δύο σημεία επαφής, μπορεί να βραχυκυκλώσει την μπαταρία. Μην χρησιμοποιείτε μεθόδους απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία που αυξάνουν τη θερμοκρασία της λούπας ή του φωτισμού.

Έξοδος φορτιστή

PowerBand: DC 5V.2A.10W

Focus™ Xtend: DC 12V.1A.12W

Essential One: DC 5V.2.4A.12W

Essential Alpha: DC 5V.1A.5W



Διατηρήστε στεγνό



Ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές κοντά σε εξοπλισμό που φέρει αυτό το σύμβολο



Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή



Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικά προϊόντα στη γενική ροή αποβλήτων



Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com